



**MED KAL KOMPRESR
GNLK BAKIM ve KONTROL
FORMU**

Dokman Kodu	TY.FR.43
Yayın Tarihi	25.05.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

TAR H:

C HAZLAR

C HAZ KODU	MARKASI	MODEL	SER NO	KAPAS TES

YAPILACAK KONTROLLER

1	Bakıma ba lamadan Kompresr durdurulacak.(kontrol panosundan arteli off konumuna al)	
2	Ya seviyesi kontrol edilecek.	
3	Ya ve hava kaak kontrol yapılacak.	
4	Depo ve hat filtresi suyu bo altılacak.	
5	Otomatik tahliye valfinin alı ma sı kontrol edilecek.	
6	Cihaz bilgi ekranında uyarı yazısı ya da i areti var mı kontrol edilecek. alı ma saati forma i lenecek.	
7	Cihazın alı ma sı sırasında ses ve titre im kontrol yapılacak.	
8	Kompresr odasının ve kompresrn temizli i kontrol edilecek.	
9	Hava filtresi kontrol edilecek , gerekiyorsa temizlenecek.	
10	Kayı gerginli i kontrol edilecek.	

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

Bakımı Yapan

Teknik Servis Sorumlusu

