



**ANESTEZ C HAZI  
BAKIM ve KONTROL FORMU**

Doküman Kodu	TY.FR.89
Yayın Tarihi	27.09.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa Numarası	1

**C HAZ B LG LER**

<b>MARKASI</b>		<b>KULLANIM YER</b>		<b>BAKIM PER YODU</b>	<b>1 AYLIK</b>
<b>MODEL</b>		<b>SER NO</b>		<b>BAKIM TAR H</b>	

<b>YAPILACAK KONTROLLER</b>		<b>YAPILDI</b>	<b>YAPILAMADI</b>
1	1 aylık bakım ve kontroller teknik servis tarafından yapılacak.		
2	Cihazın fiziki temizli i yapılacak		
3	Cihaz gaz giri leri ve prizleri kontrol edilecek		
4	Gaz giri i seçme valflerinin kontrolü yapılacak		
5	Cihazda gaz kaça ı kontrolü yapılacak		
6	Manometreler ve göstergelerin çalı ması kontrol edilecek		
7	Flowmetre kontrolü yapılacak		
8	Monitör ve di er ekipmanların çalı ması kontrol edilecek		
9	Cihazın elektriksel ba lantıları kontrol edilecek		
10	Cihazın mekanik ba lantı noktaları kontrol edilecek		
11	Cihazın kapa ı açılarak içerisi basınçlı hava ile temizlenecek		
12	Cihazın so utma fanlarının çalı ması kontrol edilecek ve filtre temizli i yapılacak		
13	Yetkili servis tarafından belirlenen conta, o-ring, filtre ve hortumlar de i tirilecek.		
14	Yapılan kontrollerde tespit edilen arıza ve eksiklikler teknik rapor kısmına yazılacak		

**TEKN K RAPOR**

Bakımı Yapan Teknisyen  
mza

İlgili Servis Sorumlusu  
mza

Teknik Servis Sorumlusu  
mza